



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛЁНКИ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ ТАТУИРОВКИ «ЗАПЛАТКА» ОТ БРЕНДА ONE SHOT



1. После нанесения татуировки нанесите компресс на кожу без спиртовым антисептиком (Хлоргексидин, Мирамистин, Октанисепт).
2. Компресс выдержать в зависимости от количества выделяемой лимфы от 10 до 30 минут.
3. Промыть татуировку мыльным раствором от бренда ONE SHOT ("Точное" мыло-пенка или "Убойное" мыло-концентрат) и обработать кожу вокруг татуировки спиртовым антисептиком для более сильной фиксации пленки.
4. Наклейте плёнку, начиная с чистой кожи и наслаивая её с нахлёстом на предыдущие куски.
5. Закрепите плёнку на расстоянии минимум 3 см от татуировки, с нахлёстом слоёв 2 см между кусками.
6. Не натягивайте края плёнки, чтобы избежать раздражения и дискомфорта.
7. Не мочите плёнку в течение 8 часов после нанесения.
8. В течение суток после нанесения выделяется лимфа, которая может исказить изображение под плёнкой - это нормально.

9. Мойтесь на следующий день после нанесения, избегая попадания моющих средств на плёнку.
10. Не рекомендуется размачивать и распаривать плёнку.
11. Носите плёнку до 7 дней, если нет дискомфорта.
12. Снимите плёнку под водой, предварительно размочив, чтобы уменьшить дискомфорт при отклеивании.
13. Промойте татуировку с мылом, высушите кожу и нанесите мазь, рекомендованную вашим мастером.
14. Продолжайте пользоваться мазью до полного восстановления кожи.

